



DOCUMENTO	FT-ED-01
FECHA ACT.	11/10/2019
ACTUALIZACION	A
VIGENCIA DESDE	11/10/2019
PAGINA	1 DE 3

## Respirador K6 (N95)

### Su respirador

El respirador libre de mantenimiento KOS K6 es un respirador purificador libre de mantenimiento que garantiza una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra partículas libres de aceite en concentraciones <10 TLV.

Fabricado en poliéster no tejido, liviano y suave, con un **Medio Filtrante Electrostático**, sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro; las microfibras cargadas electrostáticamente hacen que la respiración sea más fácil y más fresca.

Diseño anatómico, moderno y Tecnología FOLD/FLAT de forma plegable y extra plana que facilita guardarlo y permite mantenerlo libre de impurezas en momentos de descanso, además su estructura rígida, materiales de construcción ligeros y sellado por ultrasonido evitan el colapsamiento y dan mayor comodidad al usuario, **brindando un mayor tiempo de uso**. El diseño de sus bandas elásticas y el clip de acero para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara.

### Aprobaciones



Los respiradores contra partículas de KOS Protección S.A.S. están fabricados bajo el estándar internacional 42CFR84 sobre Protección respiratoria del Instituto nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE.UU. (NIOSH) para la clasificación N95.

Test de Penetración de partículas evaluado acorde a los parámetros establecidos en la 42CFR84.41, TEB-APR-STP-0058 Y TEB-APR-STP-0059.

Test de evaluación de diferencia de presión o Respirabilidad es evaluado acorde a los parámetros establecidos en la 42CFR84.180, TEB-APR-STP-007 y RTC-APR-STP-003

### Componentes K6

**Bandas de ajuste:** Elástico Croché  
**Clip metálico:** Acero Galvanizado  
**Elemento filtrante:** Tela no tejida de polipropileno y poliéster.  
**Peso aprox.:** 10g.  
**Color:** Blanco

### Aplicaciones

- Agroquímicos
- Construcción
- Rectificado
- Molienda
- Metalmecánica
- Limpieza
- Mantenimiento



# HOJA TÉCNICA

DOCUMENTO

FT-ED-01

FECHA ACT.

11/10/2019

ACTUALIZACION

A

VIGENCIA DESDE

11/10/2019

PAGINA

2 DE 3


1

Sujete el respirador en la mano, dejando que los elásticos de ajuste cuelguen, cubra desde el mentón hasta la nariz y sosténgalo firmemente.



2

Estire la banda de la parte inferior y pásela por detrás de la cabeza hasta llegar a la nuca.

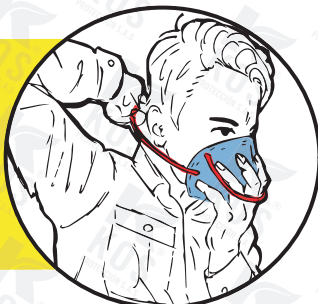

3

Estire la banda de la parte superior y pásela por detrás de la cabeza hasta llegar a la coronilla.



4

Usando las dos manos moldeee y presione la lamina nasal ubicada sobre el tabique para formar un buen sello facial.

NOTA: El usar solamente una mano puede resultar en un desempeño menos efectivo del respirador.



5

Revise el ajuste cubriendo la parte frontal con ambas manos cuidando no modificar la posición del respirador y exhale con fuerza. Si siente que sale aire alrededor de la nariz, reajuste la lámina metálica como se describe en el punto 4.; si siente la fuga por los bordes, reajuste los elásticos. Repita según sea necesario hasta obtener un ajuste satisfactorio.



## NOTA:

Si NO PUEDE conseguir un ajuste perfecto REEMPLACE el respirador.

Cuando haga una pausa durante el trabajo, fuera del área contaminada, ubique el respirador sobre su pecho. Devuelva el elástico inferior por encima de la cabeza y deje el elástico superior alrededor de la nuca.

Recuerde que la observación cuidadosa de estas instrucciones es un importante paso para el uso seguro del respirador.

Si no es usado, aún durante una pequeña parte de la jornada, la protección global caerá drásticamente.

La capacitación contribuye a lograr la aceptación del trabajador y un alto tiempo de uso.

## Tecnologías en Desempeño (características técnicas)

Los respiradores contra partículas de KOS Protección S.A.S. cuentan con un diseño anatómico y moderno que reúne los adelantos tecnológicos de la a nivel mundial.

**Filtro Electrostático Avanzado:** La innovadora tecnología de las microfibras cargadas electrostáticamente, permite una eficiencia en filtración de más del 95% permitiendo que la respiración sea más fácil y más fresca.

**Diseño anatómico cómodo:** Mayor tiempo de uso debido a caída de presión baja y mínima resistencia al paso de aire, claridad plena de comunicación con el tono normal de voz y facilidad de respiración a través del filtro.

**Bandas Elásticas de Sujeción:** Práctico diseño de dos bandas de alta resistencia que brindan un ajuste preciso, cómodo (no provoca irritación) y quedan bien aseguradas ya que permiten distribuir uniformemente la tensión del elástico en la corona de la cabeza y la nuca, conserva sus propiedades elásticas bajo condiciones de uso agresivas.

**Clip metálico ajuste nariguera:** Se ajusta fácilmente con mayor comodidad y seguridad, adaptándose a cualquier tipo de nariz mejorando el ajuste facial, optimizando el hermetismo en condiciones extremas de sudoración. Reduce la posibilidad de empañamiento y garantiza excelente desempeño en climas cálidos.

**Libre de mantenimiento:** Elimina las tareas de limpieza y cambio de partes.

**Nivel de Protección:** N95. Otorga una cómoda y efectiva protección contra partículas de polvo y humos metálicos libres de aceite con un 95% de eficiencia de filtración.

**Compatibilidad:** Diseño de contorno bajo que facilita el uso de una amplia gama de equipos de seguridad, incluyendo la protección ocular y auditiva.

**Resistencia al colapso:** Tela No tejida en poliéster que da cuerpo y firmeza, cuya estructura es reforzada por medio de un avance tecnológico en diseño con nuestro punto anticolasamiento, garantizando su forma en climas húmedos o en altas temperaturas manteniéndose ajustado al rostro

**Empaque Individual:** Higiene y cuidado del respirador manteniéndolo limpio cuando lo necesite.





# HOJA TÉCNICA

DOCUMENTO	FT-ED-01
FECHA ACT.	11/10/2019
ACTUALIZACION	A
VIGENCIA DESDE	11/10/2019
PAGINA	3 DE 3

## Concentraciones Límites

- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición o menores de 0,05 mg/m<sup>3</sup>.
- No usar en atmosferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%.
- No usar en atmosferas cuyo contaminante esté en concentraciones IDHL (inmediatamente peligrosas para la vida y salud).
- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición o menores de 0,05 mg/m<sup>3</sup>.
- No usar en atmosferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%.

## Precauciones y Limitaciones

Desempeño efectivo contra polvo (incluyendo sílice libre, carbón, hierro, algodón, trigo y aluminio generados a partir de la desintegración de sólidos en procesos industriales como: pulverizado, triturado, molienda, fresado, esmerilado, lijado, y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos no aceitosos.

Estos respiradores no suministran oxígeno. No usar en atmósferas que contengan menos del 19,5 % de oxígeno. No usar en atmosferas que contengan vapores y gases tóxicos, Asbestos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena. No usar cuando las concentraciones de los contaminantes sean peligrosas para la vida y la salud. No utilizar con barba u otro vello facial u otras condiciones que impidan un buen sello entre el rostro y el sello facial (o borde) del respirador. El medio filtrante del respirador no necesita mantenimiento. No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición o menores de 0,05 mg/m<sup>3</sup>\*. Cuando el usuario sienta olor o sabor del contaminante o dificultad al respirar, debe verificar el ajuste; si persiste la mascarilla debe ser reemplazada por una nueva.

### Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

### Presentación y Condiciones de transporte

El respirador KOS K6 preserva sus condiciones de higiene por medio de empaque individual y la unidad de venta es de caja por 1.000 unidades. Sitios secos, frescos y limpios. Evite la humedad.

## PARA MAYOR INFORMACIÓN:



KOS PROTECCIÓN S.A.S.  
E-MAIL: OPERACIONES@KOS.COM.CO

KOS SOPORTE EN LÍNEA:  
TEL.: +571 613 2941  
CEL.: +57 300 705 9496  
WWW.KOS.COM.CO  
CARRERA 37D SUR # 72J - 34  
BOGOTÁ - COLOMBIA



GET CONTACT

